

頸椎カーブ保持マクラ「パピ」

PaPi

パピ

NEW

いままでにない
爽やかな使用感
適度な硬さの
ネックホールドサポート

高さ調整機能


アーチサスペンション機能

高品質低反発ウレタン使用

すっきり「小顔」には「アゴが突き出す姿勢」は禁物です。

就寝中の「アゴ」を引いた綺麗な寝姿勢がまず大切です。

大切なのは、自然な立ち姿での「綺麗な頸椎カーブ」を寝姿でも維持することです。

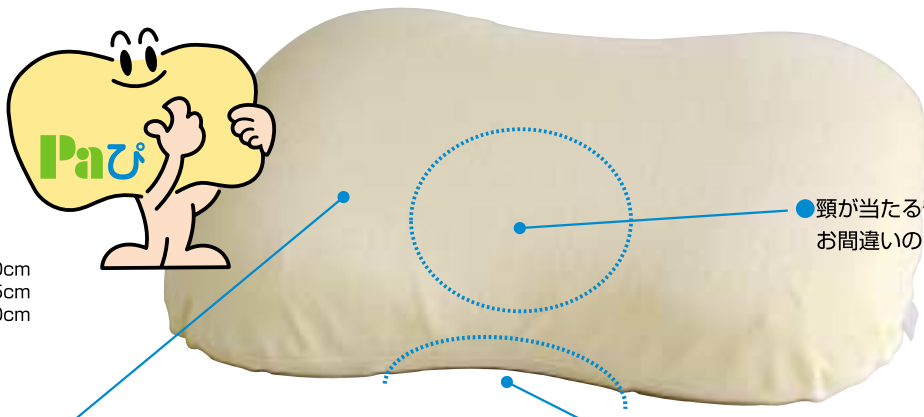

サイズ：(幅) 60cm
(左右奥行) 40cm
(中央奥行) 35cm
(左右高さ) 10cm
(頸高さ) 7cm
重量：約800g

● 頸が当たる部分はふくらみがありますのでお間違いのないようにご使用ください。

- マクラ上層部は、高品質低反発ウレタンで覆っており接触感は一層気持ちよくフィットします。
- 頸部が不安定な方の為に、適度な硬さでホールド感をもちました。

● 違和感無く寝返りがうてるように、当社のパテント「アーチサスペンション機能」を備えました。

- マクラ底部に、3分割されたパッドが挿入されております。頸部、横向きでの就寝時の左右の高さがお好みで調整できます。

パッドの使用例

- 1) 頸部がきつく感じられる方は、②のパッドを横のファスナーを開き抜き取ってください。
 - 2) まくら全体が高いと感じられる方は、①②③のパッドをお取りください。
 - 3) 横向きでの就寝で多い方で、右向きで寝られる方は、③のパッドをお取りください。左向きで寝られる方は、①のパッドをお取りください。
 - 4) 横向きの就寝で肩のねじこみがきつと感じられる方は、①と③のパッドを重ねてご使用頂いても結構です。
 - 5) 全体に高さが低いと感じられる方はタオル等をパッドの大きさに折込み、パッドの下に敷き高さを調節してください。
- ※ ご自分に合わせた調整をご選択ください。



高さ調節3分割パッド

頸椎カーブ保持マクラ PaPi は医療機関向け専用商品です。お求めの際は、治療院様、医院様にお問い合わせください。

ウエイトチェンジPB



ウエイトチェンジPBにマッチした高さ設定です。
※底部パッドを外してご使用ください。

機能性抱きマクラ・ジュビ



ジュビとの併用で快適にご使用頂けます。



- 綿カバー標準装備
- 保存用通気性不織布袋付き(商品バック)

標準小売価格(税別) MA-09010

¥5,800 税込価格 ¥6,090
Made in Japan(本体・カバー/日本製)